

Contact Letter

November '04



Anpassung

Knacknüsse VPT-Contactlinsen!

Die VPT rutscht zu weit nach unten

Tiefsitzende prismatische Linsen können nicht auf Dauer akzeptiert werden. Die Folge einer solchen Dezentrierung nach unten sind 3-9-Uhr-Stippen und/oder rote Augen.

Bei Pluslinsen ist die Auswahl der Materials entscheidend, um das Gewicht der Linse zu verringern. Als besonders günstig hat sich hier das Paragon HDS Material erwiesen. Auch die Verkleinerung des Durchmessers bewirkt eine leichtere Linse und kann zum Zentrieren der Linse beitragen.

Das Anbringen eines Minustragrandes ist derzeit bei prismatischen Linsen technisch leider noch nicht möglich.

Hochsitz der VPT

Bei hochsitzenden prismatischen Linsen kann der Gesamtdurchmesser verkleinert werden, um den Oberlidenfluss abzuschwächen, so dass in Folge die Linse leichter „freigegeben“ wird.

Eine Erhöhung des Prismas kann zusätzlich oder alternativ erfolgen, damit das höhere Linsengewicht dem Hochsitz entgegenwirkt.

Unsere E-MAIL Adressen

Bestellungen
bestell@hecht-contactlinsen.de

Anpassberatung
service-center@hecht-contactlinsen.de

Seminaranmeldung
seminar@hecht-contactlinsen.de

**Alles zum Thema
Contactlinsen Comfort Concept (CCC)**
ccc@hecht-contactlinsen.de

Allgemeines

Gewinner unseres Sommer-Rätsels

Schon wieder ein Jahr vorbei – hatte ein Einsender auf die FAX-Rätsel-Antwort geschrieben. Und er hatte natürlich recht. Auch in diesem Jahr waren wieder viele Teilnehmer, die sich die Zeit genommen haben, um das Sommerrätsel zu lösen.

Das Lösungswort lautete: SORBET

Alle Einsendungen waren richtig. Doch leider konnte unsere Glücksfee nur drei Gewinner für den Hauptgewinn ermitteln, jeweils ein Sommer-Picknick-Set, gefüllt mit allen notwendigen Asseccoirs.

Auch wenn der Sommer sich in diesem Jahr nur noch von hinten zeigt – er wird wieder kommen und kann gebührend empfangen werden mit einem Picknick im Freien. Die Zeit und Muße dafür wünschen wir den glücklichen Gewinnern und gratulieren nochmals auf diesem Wege.



Augenoptik Martin
Kaiserslautern

Herrn Martin wurde durch unsere Aussendienstmitarbeiterin Carola Enke der Picknickkorb überreicht.



Brillen Fuchs
Siegen

Bei Brillen Fuchs war das ganze Team zusammen mit unserer Aussendienstmitarbeiterin Manuela Surau zum Phototermin bereit.



Hinz Optik GmbH
Heide

Und in Heide engagierte sich unsere Aussendienstmitarbeiterin Contanze Holm als Überbringerin.

Allen anderen Teilnehmern mit richtigem Lösungswort war ein Geschenk versprochen, ein Taschenmesser. Dieses wurde den Teilnehmern zwischenzeitlich zugesendet.

Nochmals ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für's Mitmachen!!!

Anpassung

Auswahl der 1. Anpasslinse mit dem Keratographen

Nur die Bewertung der gemessenen Radien und Exzentrizitäten allein würde die Möglichkeiten des OCULUS-Keratographen nicht ausschöpfen. Erst das simulierte Fluobild der vorgeschlagenen Linse erlaubt eine Aussage zu deren Passform. In den meisten Fällen sind die vorgeschlagenen Werte für die erste Anpasslinse schon sehr praktikabel. Doch auch diese können nach Belieben variiert und die veränderten Fluobilder erneut beurteilt werden. Möglich ist das mit dem integrierten HECHT-Anpass-Modul.



Dadurch kann der zeitliche Aufwand zum Bestimmen der ersten sinnvollen Anpasslinse reduziert und somit ein schnellerer und rationellerer Anpassverlauf realisiert werden. Auch die Beurteilung der Passform mit den Linsen, welche im Anpasssatz vor Ort vorhanden sind, gibt eine Entscheidung, ob damit weiter gearbeitet werden kann oder ob besser Leihlinsen in geeigneteren Parametern bestellt werden müssen. (Siehe Katalog, Rubrik Hartlinsen, ab Seite 54, Leihlinsen)

Hecht unterstützt Sie!

Bei Anpassfällen, in denen Sie unsere Unterstützung bei der Auswahl von „aufwendigeren“ Linsengeometrien wünschen, können Sie uns Ihre Keratographenmessungen per Diskette oder CD-ROM oder per eMail schicken.

Bei der Übermittlung per eMail ist darauf zu achten, dass die Daten in gepackter Form (z.B. mit WinZip) versandt werden.

